



VERKORTE INSTRUCTIE VOOR DE **PATIËNT**

Deze handleiding geeft handige tips voor het voorbereiden en uitvoeren van uw afspraak in de NeuroSphere™ virtuele kliniek met zorg op afstand voor bewegingsstoornissen.

NEUROSHERE™ VIRTUELE KLINIEK



PATIENT CONTROLLER



AAN DE SLAG:

VOORBEREIDING OP UW AFSPRAAK IN DE NEUROSPHERE™ VIRTUELE KLINIEK

Het is belangrijk om een juiste omgeving te vinden voor uw afspraak in de virtuele kliniek.

- Kies een rustige, goed verlichte plek met de best mogelijke Wi-Fi- en/of mobiele signaalsterkte.
- Beperk achtergrondgeluiden en andere afleidingen zoals de tv en huisdieren.
- Zoek een plek waar u ook comfortabel kunt gaan liggen voor de beoordelings- en programmeersessie die tijdens uw afspraak wordt uitgevoerd.

Onderwerpen die in de instructie worden behandeld

ÉÉN

Voorbereiding op uw afspraak in de NeuroSphere™ virtuele kliniek

TWEE

Verbinding maken met de virtuele kliniek

DRIE

Navigeren door de virtuele kliniek

VIER

Interactie met uw arts op afstand

VIJF

Problemen oplossen tijdens een afspraak in de virtuele kliniek

ZES


Afronden van een afspraak in de virtuele kliniek

VOOR UITGEBREIDE INSTRUCTIES OVER HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIE 'ZORG OP AFSTAND' IN UW PATIËNTCONTROLLER-APP VAN ABBOTT NEEMT U CONTACT OP MET UW ARTS.

ÉÉN

VOORBEREIDING OP UW AFSpraak IN DE
NEUROSPHERE™

VIRTUELE KLINIEK

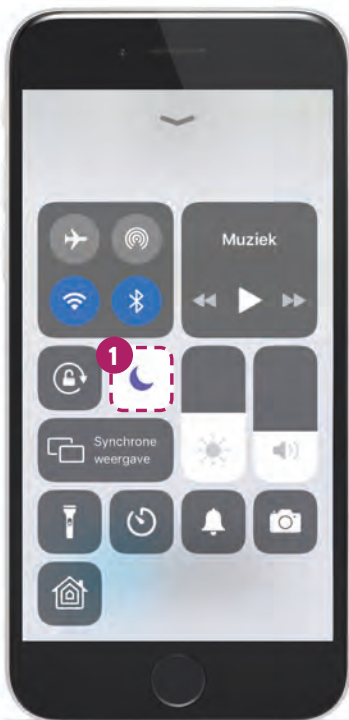

Het is belangrijk dat u uw digitale apparaat controleert voordat u een afspraak in de virtuele kliniek begint

- Zet uw iPhone⁺ of iPod touch⁺ zo mogelijk rechtop voor een handsfree sessie
- Zoek een comfortabele plek om binnen 1-2 meter van uw iPhone⁺ of iPod touch⁺ te blijven

1 Schakel '**Niet storen**' in om onderbrekingen tijdens uw sessie te voorkomen



2 Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat voldoende is opgeladen

TWEE

VERBINDING MAKEN VOOR EEN

VIRTUELE AFSPRAAK


**GEBRUIK GEEN DRAADLOZE
HOOFDTELEFOONS** TIJDENS EEN
AFSPRAAK IN DE VIRTUELE KLINIEK,
OMDAT DEZE PROBLEMEN KUNNEN
GEVEN MET DE DRAADLOZE
BLUETOOTH®-VERBINDING MET UW
NEUROSTIMULATOR

Voorafgaand aan uw eerste afspraak
in de virtuele kliniek zal uw arts
u helpen bij het voltooien van het
registratieproces




TWEE


VERBINDING MAKEN VOOR EEN VIRTUELE AFSPRAAK

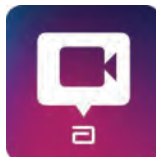

- 1 Uw arts zal u bellen en verwijzen naar de NeuroSphere™ virtuele kliniek.

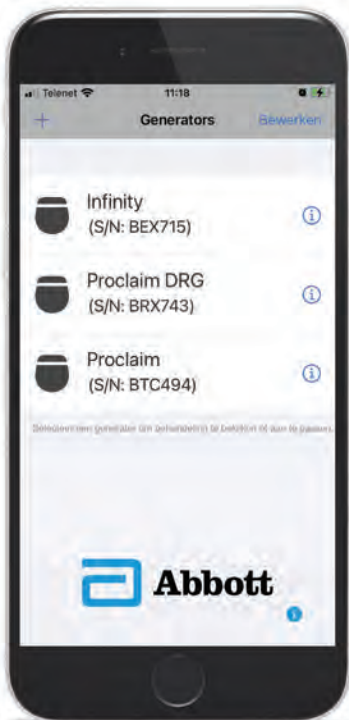

- 2 Selecteer op het scherm **Generator** de IPG voor uw afspraak in de virtuele kliniek

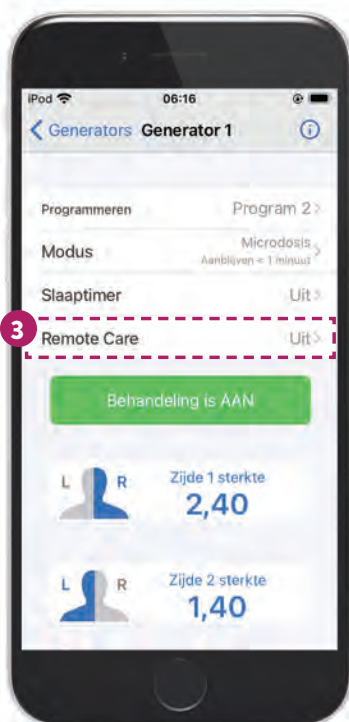

- 3 Selecteer in het startscherm de optie 'Remote Care' (zorg op afstand)

TWEE

VERBINDING MAKEN VOOR EEN VIRTUELE AFSpraak



- 4 Zet de schuifknop van **Zorg op afstand** op 'Aan' en wacht tot uw arts verbinding maakt


LEES DE INSTRUCTIES VOOR DE
AFSPRAAK IN DE VIRTUELE KLINIEK
DOOR NADAT U DE SCHUIFKNOP
ZORG OP AFSTAND OP 'AAN' HEBT
GEZET



- 5 Wacht tot de melding '**Sessie gereed voor starten**' wordt weergegeven

- 6 Selecteer '**Start**' om uw afspraak in de virtuele kliniek te starten

UW ARTS KAN GEEN Sessie MET U
STARTEN ZONDER UW TOESTEMMING

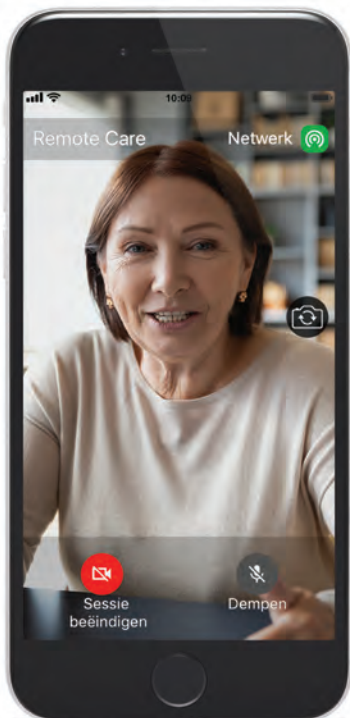

- 7 U ziet een video van uzelf totdat uw arts verbinding heeft gemaakt

U hebt volledige controle over het starten en stoppen van een afspraak in de virtuele kliniek



- 8 Zodra uw arts deelneemt, kunt u via videochat praten

DRIE

NAVIGEREN DOOR DE

VIRTUELE KLINIEK



- 1 Indicator netwerkstatus
- 2 Camera wisselen
- 3 Gebruik de knop '**Sessie beëindigen**' alleen in noodgevallen (bijvoorbeeld als er aanzienlijke verbindingsproblemen optreden)
- 4 Mute-knop die het geluid dempt voor uw arts



GROEN

Goede netwerkverbinding



GEEL

Trage netwerkverbinding



ROOD

Zeer trage netwerkverbinding

VIER INTERACTIE MET UW ARTS OP AFSTAND



WITHIN
1-2 METERS



**BLIJF ALTIJD BINNEN HET BLUETOOTH®-BEREIK VAN UW IOS±-
SOFTWAREAPPARAAT (BINNEN 1-2 METER).**

DE BLUETOOTH® -VERBINDING MOET IN STAND WORDEN GEHOUDEN OM
DE PROGRAMMERING VAN UW NEUROSTIMULATOR AAN TE PASSEN


VIJF

PROBLEMEN OPLOSSEN TIJDENS EEN AFSPRAAK IN DE VIRTUELE KLINIEK

ALS DE VERBINDING WORDT VERBROKEN TIJDENS EEN VIRTUELE KLINISCHE
SESSIE KUNT U OP DE VOLGENDE MANIEREN REAGEREN OP DE ONDERBREKING:



- 1 Houd uw toepassing open
- 2 De melding 'Sessie onverwacht beëindigd' wordt weergegeven
- 3 Klik op de knop 'Negeren'.

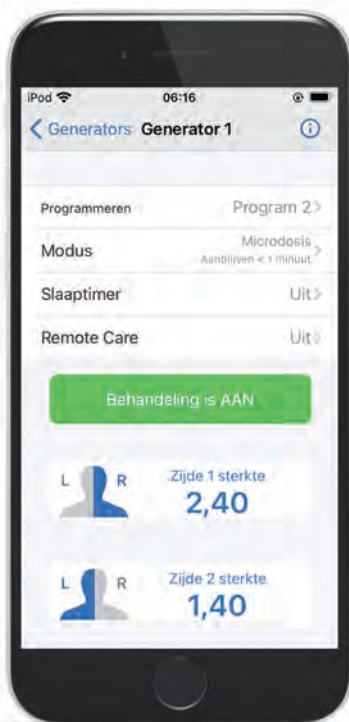


NADAT U DE MELDING HEBT
GESLOTEN, **KEERT U TERUG NAAR HET
BEGINSCHERM VOOR THERAPIE**

Uw instellingen worden teruggezet
naar de laatst bekende therapie-
instellingen die zijn opgeslagen in
uw beschermd herstelprogramma

ZES

EEN AFSpraak IN DE

VIRTUELE KLINIEK AFRONDEN

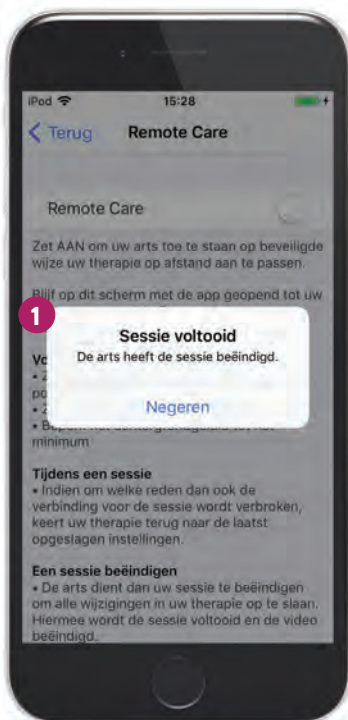


UW ARTS MOET DE SESSIE SLUITEN OM
DE AANPASSINGEN OP TE SLAAN

- 1 Aan het einde van uw sessie wordt de melding 'Sessie voltooid' weergegeven

Beëindig uw sessie niet en sluit de toepassing niet af totdat deze melding wordt weergegeven



- 2 Selecteer de toets 'Negeren'

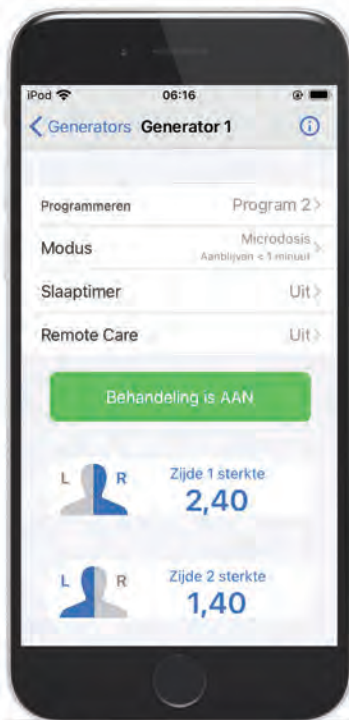

- 3 Selecteer '**Generators**' om terug te gaan naar het beginscherm

Therapie

- 4 Controleer of uw nieuwe therapie-instellingen voldoen aan uw verwachtingen op basis van uw afspraak in de virtuele kliniek

Risico-informatie: er is geen genezing voor de ziekte van Parkinson (PD) en essentiële tremor (ET), maar er zijn opties beschikbaar om symptomen te behandelen. De eerstelijns therapie is medicatie. Er zijn ook chirurgische behandelingen beschikbaar. Het is belangrijk om met uw arts te bespreken wat voor u juist is, samen met de risico's en bijwerkingen van elke optie, zoals motorische fluctuaties of permanente neurologische beschadigingen. Zoals bij elke chirurgie of therapie heeft DBS risico's en complicaties. Verlies van coördinatie is één mogelijke bijwerking van DBS-therapie. Patiënten moeten redelijke voorzichtigheid betrachten bij het deelnemen aan activiteiten die coördinatie vereisen, inclusief activiteiten die werden uitgevoerd voordat de therapie werd gestart (bijvoorbeeld zwemmen). Patiënten moeten ook redelijke voorzichtigheid betrachten bij het baden. Nieuwe of verergerde depressie, die tijdelijk of permanent kan zijn, is één risico dat is gemeld bij DBS-therapie. Suïcidale gedachten, zelfmoordpogingen en zelfmoord zijn gebeurtenissen die ook zijn gemeld. De meeste bijwerkingen van één DBS-ingreep zijn tijdelijk en corrigeren zichzelf na verloop van tijd. Sommige patiënten kunnen last hebben van blijvende, beroerteachtige klachten, zoals zwakte, gevoelloosheid, problemen met het gezichtsvermogen en onduidelijke spraak. Als de bijwerkingen ondraaglijk zijn of als u niet tevreden bent met de therapie, kan het DBS-systeem worden uitgeschakeld of operatief worden verwijderd. De risico's van één hersenoperatie kunnen ernstige complicaties omvatten zoals coma, bloeding in de hersenen, verlamming, toevallen en infectie. Sommige hiervan kunnen fataal zijn.

Beknpte samenvatting: neem vóór gebruik van deze hulpmiddelen de gebruikershandleiding door voor één volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen en richtlijnen voor gebruik. Bij het systeem moeten elektroden en bijbehorende extensies gebruikt worden die compatibel zijn met het systeem.

Indicaties voor gebruik: unilaterale of bilaterale stimulatie van de thalamus, globus pallidus internus (GPI) of nucleus subthalamicus (STN) bij patiënten met levodopa-responsieve ziekte van Parkinson, unilaterale of bilaterale stimulatie van de nucleus ventralis intermedius (VIM) van de thalamus ter behandeling van tremor, en unilaterale of bilaterale stimulatie van de globus pallidus internus (GPI) of de nucleus subthalamicus (STN) ter behandeling van hardnekkige, chronische dystonie, waaronder primaire en secundaire dystonie, bij patiënten die ten minste 7 jaar oud zijn.

Contra-indicaties: patiënten die niet in staat zijn om het systeem te bedienen of voor wie de teststimulatie geen succes oplevert. Diathermie en kernspintomografie (MRI) zijn gecontra-indiceerd voor patiënten met één systeem voor diepe hersenstimulatie.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: terugkeer van de klachten na abrupte stopzetting van de stimulatie (reboundeffect), overdeven stimulatie of stimulatie met lage frequentie, risico op depressie en zelfmoord, geïmplanteerde hartsystemen of andere actieve implanteerbare hulpmiddelen, kernspintomografie (MRI), elektromagnetische interferentie (EMI), nabijheid van machines en apparatuur, apparaten en ultrasoon technologie en lithotripsie met hoge uitgangsenergie, echografieapparatuur, externe defibrillatoren en therapeutische bestraling, therapeutische magneten, radiofrequentiebronnen, explosieve of ontvlambare gassen, detectiepoortjes ter preventie van diefstal en metaaldetectoren, activiteiten waarbij veel draaien of strekken nodig is, bediening van machines en apparatuur, zwangerschap en schade aan de behuizing. Verlies van coördinatie is één mogelijke bijwerking van DBS-therapie. Wees voorzichtig bij het uitvoeren van activiteiten waarbij coördinatie nodig is (bijvoorbeeld zwemmen), en wees voorzichtig bij het baden. Patiënten met grote chirurgische risico's, met meerdere ziekten of met actieve algemene infecties mogen niet worden geïmplanteerd.

Bijwerkingen: verlies van therapeutisch voordeel of verminderde therapeutische respons, pijnlijke stimulatie, aanhoudende pijnklachten rondom de geïmplanteerde onderdelen (bijv. langs het extensiepad in de nek), verslechterde motorische stoornis, parese, dystonie, stoornis of aantasting van zintuigen, spraak- of taalstoornis, cognitieve stoornis. Chirurgische risico's omvatten intracraniale bloedingen, beroerte, verlamming en overlijden. Andere mogelijke complicaties zijn onder meer toevallen en infectie. De gebruikershandleiding moet worden gelezen voor gedetailleerde informatie.

Abbott

One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 VS, Tel.: 1 651 756 2000
Neuromodulation.Abbott

™ geeft een handelsmerk aan van de Abbott-groep van ondernemingen.

‡ geeft een handelsmerk van derden aan dat eigendom is van de respectievelijke eigenaar.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

© 2021 Abbott. Alle rechten voorbehouden.

56156 MAT-2113392 v1.0 | Item goedgekeurd voor EMEA-doelgroepen.

