



**GEBRUIK VAN  
UW INTELLIS™  
IMPLANTEERBAAR  
NEUROSTIMULATIESYSTEEM**

**Medtronic**  
Further. Together



## INHOUD

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Uw patiëntenpasje van Medtronic | 2  |
| Basiskennis programmeerapparaat | 3  |
| AdaptiveStim™-technologie       | 7  |
| Oplaadsysteem                   | 8  |
| Vóór uw MRI-scan                | 12 |
| Meer hulpbronnen                | 16 |

Deze handleiding bevat de belangrijkste bronnen en informatie voor het gebruik van uw Intellis™-systeem voor ruggenmergstimulatie van Medtronic.

Let op: de woorden ***afstandsbediening en programmeerapparaat*** worden door elkaar gebruikt. Met de afstandsbediening/het programmeerapparaat kunt u de oplader bedienen en uw therapie aanpassen. In deze brochure wordt voornamelijk het woord ***programmeerapparaat*** gebruikt.

Raadpleeg de ***Gebruikershandleiding van de afstandsbediening (programmeerapparaat)*** voor meer informatie.

# Uw patiëntenpasje van Medtronic

U dient uw patiëntenpasje altijd bij u te hebben en ervoor te zorgen dat de informatie erop klopt.

## Uw patiëntenpasje:

- vormt in noodgevallen het bewijs dat u een implantaat hebt;
- bevat een telefoonnummer voor contact met uw arts;
- bevat informatie waarmee u beveiligingspersoneel en zorgverleners kunt laten weten dat u een medisch implantaat hebt.

Laat uw patiëntenpasje zien als u een medische of tandheelkundige ingreep moet ondergaan of als u door een beveiligingscontrolesysteem moet lopen (bijvoorbeeld op het vliegveld) dat mogelijk een alarm kan afgeven vanwege uw implantaat.

## EEN PATIËNTENPASJE ONTVANGEN

U krijgt kort na de implantatie van uw neurostimulator een patiëntenpasje.

Als uw patiëntenpasje is zoekgeraakt of gestolen, neemt u contact op met uw arts.

# Basiskennis programmeerapparaat

## TOETSEN PROGRAMMEERAPPARAAT

### 1. Neurostimulator aan/uit

Schakelt de stimulatie in en uit.

### 2. Oplaadlampje

Geeft de status van het opladen van de batterij aan *(alleen bij oplaadbare neurostimulatoren)*.

### 3. Touchscreen

Het scherm reageert op aanraking. U kunt de toetsen en functies selecteren die op het scherm worden weergegeven.

### 4. Toets met pijltjes omhoog/omlaag

- Hiermee haalt u het programmeerapparaat uit de slaapstand.
- Hiermee past u het stimulatieniveau aan.
- Hiermee kunt u navigeren en instellingen selecteren die op het scherm worden weergegeven.

### 5. Oplaadpoort

*(alleen bij oplaadbare neurostimulatoren)*

- Voor aansluiting van de opladerkabel;
- Voor het opladen van het programmeerapparaat;
- Voor het opladen van de neurostimulator.



**Opmerking:** Voor het uitvoeren van de meeste functies van het programmeerapparaat moet u eerst op de toets met pijltjes omhoog/omlaag drukken om het programmeerapparaat uit de slaapstand te halen.

## OVERZICHT THERAPIESCHERM

### 1. Batterijstatus-toets

- Druk op deze toets om de batterijstatus te controleren.
- Het linkerpictogram op deze toets geeft de batterijstatus van het programmeerapparaat weer.
- Het rechterpictogram geeft de batterijstatus van de neurostimulator weer.

### 2. Vergrendeltoets

- Druk op deze toets om het programmeerapparaat te vergrendelen.

### 3. Menutoets

- Druk op deze toets om het **Menuscher** te openen.

### 4. Groepstoets

- Druk op deze toets om de groepsnaam weer te geven (aangegeven met A, B of C).
- De groene omkadering geeft aan dat de groep actief is.

**Opmerking:** de groepstoets is grijs als de stimulatie is uitgeschakeld. Er verschijnt een oranjebericht om aan te geven dat de stimulatie is uitgeschakeld.

### 5. Programmatoetsen

- Druk op deze toetsen om tot maximaal vier programma's weer te geven, aangeduid met nummers (1-4).
- Nadat u op de **Programmatoets** in het **Beginscher** hebt gedrukt, verschijnen de beschikbare instellingen voor het betreffende programma:



**Intensity** (Intensiteit) — hiermee wordt de sterkte van de stimulatie beheerd.



**Stimulation** (Stimulatie) — hiermee wordt de stimulatie in- en uitgeschakeld.



**Rate** (Frequentie) — hiermee wordt de snelheid van de stimulatiepulsen beheerd.



**AdaptiveStim™** — hiermee wordt AdaptiveStim™ in- of uitgeschakeld (deze functie is alleen beschikbaar bij de implanteerbare **Intellis™-neurostimulator met AdaptiveStim™-technologie**).




**Pulse width** (Pulsbreedte) — hiermee wordt de duur van de stimulatiepuls ingesteld (de pulsbreedte is van invloed op de sterkte en het werkingsgebied van de stimulatie).



**Cycling** (Cyclisch) — hiermee wordt de stimulatie met regelmatige tussenpozen in- en uitgeschakeld volgens de programmering door uw arts.




**Toetsen met pijltjes omhoog/omlaag** — druk op deze toetsen om extra parameter- en stimulatie-instellingen voor een programma weer te geven (deze toetsen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de manier waarop uw arts uw neurostimulator heeft geprogrammeerd).

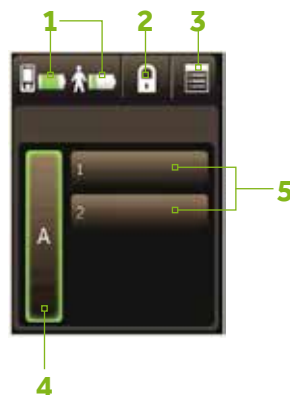

## DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HET PROGRAMMEERAPPARAAT

### Uw programmeerapparaat ontgrendelen

1. Als de **toets met pijltjes omhoog/omlaag** wordt ingedrukt om het programmeerapparaat uit de slaapstand te halen, verschijnt het scherm **Unlock** (Ontgrendelen).
  - Als het programmeerapparaat ontgrendeld is, kunt u de **Aan/uit**-toets indrukken om het ontgrendelscher over te slaan en de stimulatie in of uit te schakelen.
2. Houd de toets **Lock** (  ) (Vergrendelen) op het ontgrendelscher ingedrukt.
  - Terwijl de toets **Lock** (Vergrendelen) ingedrukt blijft, verschijnen er balken op het scherm die in de richting van de toets **Lock** (Vergrendelen) bewegen.
  - Laat de toets **Lock** (Vergrendelen) los wanneer het scherm verandert in een cirkel met puntjes. Dit geeft aan dat het programmeerapparaat naar uw neurostimulator zoekt.

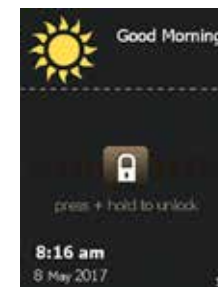

### Stimulatie in- en uitschakelen voor alle programma's binnen een groep

1. Druk op de **Aan/uit**-toets die zich boven op uw programmeerapparaat bevindt om de stimulatie in of uit te schakelen.
  - Druk op de toets **Unlock** (Ontgrendelen) als u in plaats daarvan het **Beginscher** wilt openen.
2. Het **Beginscher** verschijnt om te bevestigen of de stimulatie al dan niet is ingeschakeld.

**Opmerking:** Als de stimulatie is ingeschakeld, wordt de actieve groep groen omkaderd weergegeven.

### Het stimulatieniveau bijstellen

1. Druk op een **Programmatoets** op het **Beginscher**. De beschikbare instelling voor het betreffende programma wordt weergegeven.
2. Gebruik de **toetsen met pijltjes omhoog/omlaag** om de gewenste programma-instellingen aan te passen.

### BEGINSCHERM




**Opmerking:** Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit hangt af van de programmering van uw neurostimulator door uw arts.

## Een groep wijzigen

1. Selecteer in het **Beginscherm** de huidige groep aan de linkerkant van het scherm om de overige beschikbare groepen zichtbaar te maken en selecteer vervolgens de cirkel naast de gewenste groep. Er kan slechts één groep tegelijk worden geselecteerd.
2. Er zijn maximaal drie groepen beschikbaar. De groepen worden weergegeven met de letters A, B en C.
3. Druk op de toets **OK**. Het **Beginscherm** verschijnt met de geselecteerde groep.

## Het batterijniveau van het programmeerapparaat controleren

4. Druk in het **Beginscherm** op de toets Battery status (Batterijstatus). Er verschijnen twee batterijafbeeldingen.

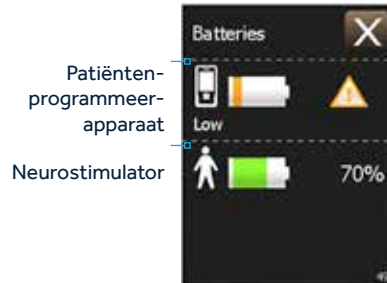

5. Druk op het kruisje (X) in de rechterbovenhoek van het touchscreen om het scherm te sluiten.

## WAARSCHUWINGS-, ALARM- EN KENNISGEVINGS-SCHERMEN

Waarschuwingsschermen duiden op een probleem met het programmeerapparaat, de oplader of de neurostimulator. Zie het onderdeel Waarschuwingsschermen van de afstandsbediening (het programmeerapparaat) voor meer uitleg over elk waarschuwingsscherm.

| Pictogram | Beschrijving                         | Type scherm         |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|
|           | Rode driehoek met een uitroepteken   | Waarschuwingsscherm |
|           | Oranje driehoek met een uitroepteken | Alarmscherm         |
|           | Blauwe cirkel met de letter "i"      | Kennisgevingsscherm |

Alarmschermen duiden op een probleem met het koppelen of verbinden van het programmeerapparaat, de oplader of de neurostimulator. Zie het onderdeel Alarmschermen van de afstandsbediening (het programmeerapparaat) voor meer uitleg over elk alarmscherm.

Kennisgevingsschermen geven informatie over stimulatie-instellingen, foutieve instellingen en batterijniveaus. Zie het onderdeel Kennisgevingsschermen van de afstandsbediening (het programmeerapparaat) voor meer uitleg over elk kennisgevingsscherm.

## AdaptiveStim™-technologie

Deze functie is alleen beschikbaar bij de geïmplanteerde **Intellis™-neurostimulator met AdaptiveStim™-technologie** Model 97715.

Wanneer AdaptiveStim™ is ingeschakeld, kan de geïmplanteerde neurostimulator automatisch uw lichaamshouding herkennen en de stimulatie op basis daarvan aanpassen.

**Opmerking:** AdaptiveStim™ moet zijn ingeschakeld om de instellingen voor AdaptiveStim™ te kunnen bekijken of wijzigen.

## AdaptiveStim™ in- of uitschakelen

1. Druk op een **Programmatoets** in het **Beginscherm** voor het programma dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de toets **AdaptiveStim™** (⏻). Het scherm **AdaptiveStim™** wordt rechts weergegeven.
3. Druk op de **Aan/uit**-toets om AdaptiveStim™ in of uit te schakelen.

**Opmerking:** Als u AdaptiveStim™ voor één programma in- of uitschakelt, werkt het voor alle programma's.

4. Druk op het kruisje (X) in de rechterbovenhoek van het touchscreen om het scherm te sluiten.



## AdaptiveStim™ aanpassen

1. Als u de intensiteitsinstellingen van AdaptiveStim™ voor een bepaalde houding wilt aanpassen, brengt u uw lichaam in de gewenste houding voordat u de aanpassingen doet.
2. Gebruik de functie **Check Position** (Houding controleren) om te bevestigen dat de neurostimulator uw lichaamshouding herkent.
3. Pas de intensiteitsinstellingen zo nodig aan.
4. Mogelijk moet u dezelfde lichaamshouding tot 5 minuten volhouden voordat de nieuwe instellingen worden vastgelegd. Uw arts kan deze tijdsduur aanpassen. Vraag uw arts naar de ingesteld tijdsduur.
5. De volgende keer dat u dezelfde lichaamshouding aanneemt, worden de intensiteitsinstellingen automatisch aangepast volgens de vastgelegde instellingen.

# Oplaadsysteem

Als u over een oplaadbare neurostimulator beschikt, kunt u hier lezen hoe u zowel uw neurostimulator als uw oplader kunt opladen.

Het oplaadsysteem bevat de volgende onderdelen:

1. De **oplader** (bevestigd aan het programmeerapparaat) laadt uw geïmplanteerde neurostimulator op.
2. Met behulp van de **riem** kan de antenne gedurende het opladen direct boven de geïmplanteerde neurostimulator worden gehouden.
3. De accu **van het programmeerapparaat** is de oplaadbare stroomvoorziening van het patiëntenprogrammeerapparaat.
4. Het **netsnoer** laadt het programmeerapparaat via het stopcontact op. Steek het ene uiteinde in een stopcontact en het andere uiteinde in het programmeerapparaat.


## Accu programmeerapparaat



## UW GEÏMPLANTEERDE NEUROSTIMULATOR OPLADEN

Als het scherm **Low Battery** (Batterij bijna leeg) verschijnt, moet u uw geïmplanteerde neurostimulator opladen.

1. Plaats de oplader (indien u de riem gebruikt) in de opening van de riem.
2. Sluit de oplader aan op de oplaadpoort van het programmeerapparaat.
3. Houd indien nodig de toets **Lock** (Vergrendelen) (  ) op het scherm **Unlock** (Ontgrendelen) ingedrukt. Het scherm **Position** (Houding) verschijnt.
4. Druk op de implantatieplaats van de neurostimulator om te bepalen wat de beste plek is om de oplader te plaatsen.
5. Plaats de oplader boven uw neurostimulator en druk op de toets **Continue** (Doorgaan). Er verschijnt een aantal schermen op het scherm van het programmeerapparaat waarop de stadia van het opladen worden aangeduid.

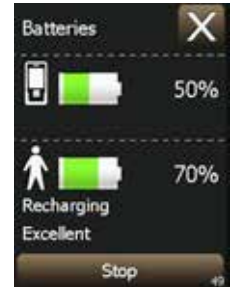

**Opmerking:** Het oplaadlampje boven het aanraakscherm knippert groen terwijl uw neurostimulator wordt opgeladen.

## Tips

- Er kan alleen worden opgeladen als de oplaadbare accu in het programmeerapparaat is geïnstalleerd.
- De accu moet worden opgeladen voordat u de batterij van de neurostimulator oplaadt.
- Laad de oplaadbare accu van het programmeerapparaat en de batterij van de geïmplanteerde neurostimulator altijd op, ook als u deze gedurende lange tijd niet gaat gebruiken.
- U kunt het programmeerapparaat en de neurostimulator niet tegelijkertijd opladen.
- Hoe snel de neurostimulator wordt opgeladen, hangt af van hoe dicht de antenne zich bij de geïmplanteerde neurostimulator bevindt en hoe diep het implantaat onder de huid is geplaatst. Met enige oefening wordt het eenvoudiger om de beste locatie op uw huid voor het plaatsen van de oplader te vinden.

**WAARSCHUWING:** U mag de oplader **NIET** gebruiken boven een wond die nog niet is geheeld. Het oplaadsysteem is niet steriel, en contact met de huid kan tot infectie leiden.

- Tijdens het opladen kunt u de stimulatie in- en uitschakelen en de stimulatie aanpassen.
- Als de oplader slecht verbonden is met uw neurostimulator, verschijnt het scherm **Reposition Antenna** (Antenne opnieuw plaatsen).

**Opmerking:** Uw oplader kan klikgeluiden maken tijdens het zoeken naar de neurostimulator.

## De temperatuur en snelheid van het opladen aanpassen:

De temperatuur en snelheid van het opladen kunnen alleen worden aangepast terwijl de neurostimulator actief wordt opgeladen. Hoe hoger het getal, hoe sneller het opladen en hoe hoger de temperatuur. De standaardtemperatuur en -snelheid van het opladen is 4.

1. Houd indien nodig de toets **Lock** (Vergrendelen) (  ) op het scherm **Unlock** (Ontgrendelen) ingedrukt.
2. Druk op de het kruisje (  ) in het scherm **Batteries** (Batterijen).
3. Druk op de toets **Menu** (  ) in het **Beginscherm**.
4. Beweeg de schuifbalk of gebruik de **toetsen met pijltjes omhoog/omlaag** om aanvullende voorkeuren weer te geven op het **Menuscherm**.
5. Selecteer de toets **Recharging** (Opladen). Het scherm **Recharging** (Opladen) wordt rechts weergegeven.
6. Selecteer met behulp van het touchscreen of de **toetsen met pijltjes omhoog/omlaag** de cirkel onder de gewenste oplaadtemperatuur- en snelheid.
  - Hoe meer balken u selecteert, en hoe hoger het getal, hoe hoger de oplaadsnelheid zal zijn en hoe warmer de oplader zal aanvoelen tijdens het opladen.
  - Het is normaal dat u tijdens het opladen enige warmte onder de oplader voelt. Als u de warmte als onprettig ervaart, verlaagt u de oplaadsnelheid.
  - De oplaadtemperatuur en -snelheid die u selecteert, blijven gelijk totdat u de instelling opnieuw wijzigt.
7. Druk op de toets **OK** om af te sluiten.
8. Druk op het kruisje (  ) om terug te gaan naar het **Beginscherm**.
9. Druk op de toets **Battery status** (Batterijstatus) (  ) om het scherm **Batteries** (Batterijen) weer te geven.

Of druk op de toets **Lock** (Vergrendelen) (  ) om het programmeerapparaat te vergrendelen.




## ACCU VAN HET PROGRAMMEERAPPARAAT OPLADEN

Het netsnoer kan **niet** worden gebruikt om AA-batterijen op te laden.

1. Steek het netsnoer in een stopcontact.
2. Sluit het uiteinde via de connector aan op de oplaadpoort van het programmeerapparaat.
3. Houd de toets **Lock** (Vergrendelen) (  ) op het scherm **Unlock** (Ontgrendelen) ingedrukt. Als het opladen is geslaagd, begint het woord 'Recharging' (Opladen) te knipperen op het scherm **Batteries** (Batterijen).

**Opmerking:** Het oplaadlampje boven het aanraakscherm knippert groen terwijl de accu van uw programmeerapparaat wordt opgeladen. Als de accu van uw programmeerapparaat is opgeladen, knippert het oplaadlampje boven het aanraakscherm niet meer en blijft het groen branden. Het scherm **Batteries** (Batterijen) geeft 'Finished' (Voltooid) weer.

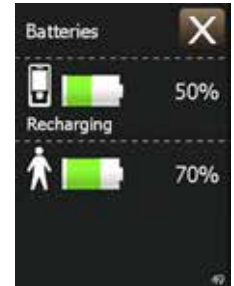

4. Druk op het kruisje (  ) om het **Beginscherm** weer te geven.
5. Druk op de toets **Lock** (Vergrendelen) (  ) om het programmeerapparaat tijdens het opladen te vergrendelen.
6. Haal het netsnoer uit de oplaadpoort van het programmeerapparaat om het opladen van de accu van het programmeerapparaat te voltooien.



# Vóór uw MRI-scan

U kunt met uw neurostimulator mogelijk een MRI-scan van een deel van uw lichaam of alleen uw hoofd ondergaan. Dit hangt af van het type neurostimulatiesysteem dat u hebt.

1. **Meld bij de arts die u een MRI-scan heeft voorgeschreven dat u een geïmplantiseerd neurostimulatiesysteem van Medtronic hebt.**
2. **Neem contact op met uw pijnspecialist om uw aanstaande MRI-scan te bespreken.**

Uw pijnspecialist kan u of uw radioloog ook voorzien van een **MRI-screeningsformulier**. Met de informatie op dit formulier kan de radioloog bepalen of u in aanmerking komt voor de voorgeschreven MRI-scan.

3. **Plan uw MRI-afspraak.** Als uw MRI-afspraak is gepland, geeft u de modelnummers van uw geïmplanteerde neurostimulatiesysteem en de contactgegevens van uw pijnspecialist door. Deze informatie vindt u op uw **patiëntenpasje van Medtronic** en op het **MRI-screeningsformulier** (dat u mogelijk van uw pijnspecialist hebt gekregen).

**Opmerking:** Controleer voordat u naar uw MRI-afspraak gaat, of uw neurostimulator is opgeladen om onnodige vertraging te voorkomen.

Als u vragen hebt over in hoeverre u in aanmerking komt voor een MRI-scan of hoe u uw neurostimulatiesysteem moet voorbereiden op een MRI-scan, neemt u contact op met uw pijnspecialist.

Een MRI-scan kan onder bepaalde voorwaarden veilig worden uitgevoerd.\* Het niet uitvoeren van de specifieke voorwaarden kan leiden tot weefselschade en ernstig letsel bij de patiënt.

\*Zorg ervoor dat uw zorgverlener contact opneemt met Medtronic voor de laatste MRI-richtlijnen voor uw neurostimulatiesysteem voor chronische pijn.

U vindt de contactgegevens op de achterzijde van deze handleiding. De zorgverlener kan ook [www.medtronic.com/mri](http://www.medtronic.com/mri) raadplegen.

## UW PROGRAMMEERAPPARAAT GEBRUIKEN OM DE MRI-MODUS TE ACTIVEREN

Zet uw neurostimulatiesysteem in de MRI-modus voordat uw MRI-scan begint en **buiten** de ruimte waar de MRI-scanner (magneet) zich bevindt.


Als u de MRI-modus met uw programmeerapparaat activeert, wordt de stimulatie uitgeschakeld en verschijnt het scherm **In MRI Mode** (In MRI-modus). Laat dit scherm aan de MRI-arts zien.

### De MRI-modus activeren:

Voer de volgende stappen uit om de MRI-modus te activeren.


1. Druk op de toets **Menu** (  ) in het **Beginscherm**.
2. Selecteer de toets **MRI Modus** (MRI-modus). Het scherm **Enter MRI Modus** (Overgaan op MRI-modus) verschijnt.
3. Druk op de toets **Continue** (Doorgaan) om door te gaan. Als de MRI-modus is geactiveerd, is uw geïmplanteerde neurostimulatiesysteem in MRI-modus gezet en is de stimulatie uitgeschakeld.

Daarnaast verschijnt een van de drie (hieronder getoonde) schermen **In MRI Mode** (In MRI-modus), waarop wordt weergegeven in hoeverre u in aanmerking komt voor een MRI-scan.

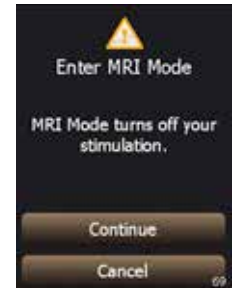

Het MRI-modusscherm geeft aan in hoeverre u in aanmerking komt voor een MRI-scan.

## Pictogrammen die MRI-scanmogelijkheid aangeven
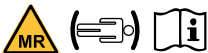
| Combinatie van pictogrammen                                                       | Verklaring                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Scan van het hele lichaam mogelijk</b></p> <p>De patiënt kan met zijn geïmplanteerde neurostimulatiesysteem onder bepaalde voorwaarden MRI-scans ondergaan op elke plek op het lichaam. De MRI-arts moet de MRI-richtlijnen voor deze voorwaarden raadplegen.</p>      |
|  | <p><b>Scan van alleen het hoofd mogelijk</b></p> <p>De patiënt kan met zijn geïmplanteerde neurostimulatiesysteem onder bepaalde andere voorwaarden uitsluitend MRI-scans van het hoofd ondergaan. De MRI-arts moet de MRI-richtlijnen voor deze voorwaarden raadplegen.</p> |
|  | <p><b>Er kan niet worden bepaald of u met uw neurostimulatiesysteem een MRI-scan mag ondergaan.</b></p> <p>De MRI-arts moet de MRI-richtlijnen raadplegen of contact opnemen met Medtronic om de vervolgstappen te bepalen.</p>                                              |

4. Druk geen andere toetsen of knoppen in.

**Opmerking:** het MRI-modusscherf op het programmeerapparaat wordt 10 minuten lang weergegeven.

5. Geef uw programmeerapparaat aan de MRI-arts terwijl het scherm **In MRI Modus** (In MRI-modus) wordt weergegeven.

**Opmerking:** neem uw programmeerapparaat niet mee naar binnen in de ruimte waar de MRI-scanner (magneet) zich bevindt.

 **Let op:** schakel de stimulatie niet opnieuw in vóór uw MRI-scan. Als u de stimulatie aan laat staan tijdens de scan, is de kans groter dat er onbedoelde, onprettige stimulatie wordt afgegeven.

 **WAARSCHUWING:** Vertel voordat u de MRI-ruimte binnengaat, aan de MRI-arts dat u een geïmplantiseerd neurostimulatiesysteem hebt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk een MRI-scan terwijl uw neurostimulatiesysteem daar niet geschikt voor is. Hierdoor kunt u letsel oplopen of kan er schade aan uw geïmplanteerde medische systeem ontstaan. De MRI-arts die uw MRI-scan uitvoert, moet op de hoogte zijn van al uw medische implantaten om de voorwaarden voor het veilig uitvoeren van uw MRI-scan te kunnen beoordelen.

## STIMULATIE OPNIEUW INSCHAKELEN NA DE MRI-SCAN

Voer de volgende stappen uit om uw stimulatie in te schakelen met behulp van het programmeerapparaat.

1. Vergrendel indien nodig uw programmeerapparaat door op het scherm **Unlock** (Ontgrendelen) de toets **Lock** (  ) (Vergrendelen) ingedrukt te houden.
2. Druk in het scherm **In MRI Mode** (In MRI-modus) op de toets **Exit MRI Mode** (MRI-modus afsluiten). Het scherm **Stimulation is off** (Stimulatie is uitgeschakeld) wordt weergegeven.
3. Druk in het scherm **Stimulation is off** (Stimulatie is uitgeschakeld) op een van de beschikbare toetsen:
  - Druk op de toets **OK** om de stimulatie uitgeschakeld te houden en terug te gaan naar het **Beginscherm**.
  - Of druk op de toets **Turn On** (Inschakelen) om de stimulatie in te schakelen en terug te gaan naar het **Beginscherm**. De stimulatie-instellingen die waren geprogrammeerd voordat u overging op de **MRI Mode (MRI-modus)**, worden hersteld.
4. Als het **Beginscherm** niet verschijnt nadat u de **MRI Mode** (MRI-modus) hebt afgesloten, raadpleeg dan het gedeelte 'Problemen oplossen' in de handleiding van de afstandsbediening (het programmeerapparaat).



## Meer hulpbronnen

### Raadpleeg uw arts voor hulp bij:

- het oplossen van problemen met het programmeerapparaat of de oplader;
- het vinden van een nieuwe arts als u gaat reizen of verhuizen;
- uw patiëntenpasje van Medtronic;
- medische vragen;
- het beheren van uw therapie, onder andere welk stimulatieniveau u dient te gebruiken en eventuele aanpassingen aan het stimulatieniveau.



Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor gedetailleerde informatie over de gebruiksinstructies, de implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg bij gebruik van een MRI SureScan®-implantaat de technische handleiding van het hulpmiddel voordat u een MRI-scan laat uitvoeren.

# Medtronic

## Europa

Medtronic International Trading Sàrl  
Route du Molliau 31  
Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
Zwitserland  
[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)  
Tel. +41 (0)21 802 70 00  
Fax +41 (0)21 802 79 00

## België

Medtronic Belgium N.V.  
Burgemeester Etienne  
Demunterlaan 5  
BE-1090 Brussel  
België  
[www.medtronic.be](http://www.medtronic.be)  
Tel. +32 (0)2 456 09 00  
Fax +32 (0)2 460 26 67

## Nederland

Medtronic Trading NL BV  
Larixplein 4  
5616 VB Eindhoven  
Nederland  
[www.medtronic.nl](http://www.medtronic.nl)  
Tel. +31 (0)40 711 75 55  
Fax +31 (0)40 711 75 22